

Handleiding opladen For-motion met lithium accu.

Let op ! Lees dit aandachtig door vóór uw eerste gebruik.

Uw voertuig is uitgerust met een Lithium accu!

Laadvoorschrift Lithiumaccu's

Deze accu is kostbaar en het opvolgen van deze richtlijnen draagt bij aan een lange levensduur! Omgekeerd, het negeren van deze richtlijnen kan tot het vervallen van de garantie voeren.

- Voor de eerste ingebruikname de accu eerst volledig opladen, nadat de laadindicator aangeeft dat de accu vol is, nog ten minste 4 uren aan de lader laten staan.

* Probeer zover de omstandigheden het toe laten, de accu eerste 5 x zoveel mogelijk van geheel vol naar geheel leeg, weer geheel vol etc. te gebruiken let op; pas na 5 x cycles heeft de accu zijn volledige capaciteit bereikt! Uw range is hiervoor dus aanzienlijk minder, blijft u in de buurt van uw laadpunt na 50% verbruikt te hebben, zodat u niet onverwacht stil komt te staan.

* Na de eerste 5x verdient het de aanbeveling om uw accu na iedere rit weer vol te laden, tenminste verdient het de aanbeveling uw scootmobiel niet weg te zetten met een acculading onder de 70%. Uw accu gebruikt door zijn inwendige elektronica en door zelfontlading dus ook stroom als uw scootmobiel stil staat. (Uw range is dus alleen in één dag te meten.)

* Voorkom zoveel mogelijk diepontlading, indien mogelijk dus tussentijds laden. Het voertuig voor langere tijd met een lege accu weg zetten is desastreus voor de levensduur en leidt tot uitsluiting van de garantie. Gestalde scootmobielen minimaal eens per maand opladen.

*Opladen: Contactslot uit, daarna eerst de stekker van de lader in het voertuig of de uitneembare accu steken en daarna de lader op het lichtnet aansluiten. Beëindiging laden: eerste de stekker van de lader uit het lichtnet halen, dan pas los koppelen van de scootmobiel of accu. Nooit de accu's onbewaakt opladen.

***Gebruik alleen de bijgeleverde lader, nooit een lader van een andere leverancier aansluiten in verband met afwijkende voltages en laadspecificaties!**

In de accu bevindt zich elektronica vermijd zeer vochtige ruimtes en direct contact met water, geen drukspuit toepassen om uw scootmobiel te reinigen.

vijfel of vragen, neemt u contact met uw leverancier of For-Motion.NI